

Правила ухода:

Для пластиковых частей ортеза предусмотрена влажная обработка при температуре не выше +40°C. Не применять хлорсодержащие моющие и отбеливающие средства. Не применять машинную стирку. Сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.



Состав изделия:

30% полипропилен, 5% поливинилхлорид, 5% нейлон, 60% гель.

Условия хранения:

Ортез должен храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации:

Ортез утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности:

Срок годности не установлен.

Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортеза без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции ортеза. Не допускается эксплуатация поврежденного ортеза.

Комплектность:

Ортопедическое изделие арт. TAN-201(G), инструкция по применению.

Гарантийный срок:

6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Сертификат соответствия № РОСС DE.ИМ24.В02193 от 14.01.2009 г.
Зарегистрировано в Минздравсоцразвития РФ. РУ ФС 2006/2376 от 28.12.2006 г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.01.12.939.П.035069.09.05 от 21.09.2005 г.

Производитель:

Рехард Технолоджис Г мбХ, Германия, 04158, Лейпциг, Фюгерштрассе 3.

Импортер:

ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 127124, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр.1.

Для корреспонденции: Россия, 127220, Москва, а/я №60.

Арт. INTOK-TAN-201(G)-NS_410



Medical Line

Зарегистрировано в Минздравсоцразвития РФ



Инструкция по применению ортопедических изделий



Ортез на голеностопный сустав усиленный,
пластиковый, с гелевыми подушками
TAN-201(G)

Сделано в Германии

Свойства товара (оказываемые эффекты):

Ортез Orlett® на голеностопный сустав, усиленный, пластиковый, с гелевыми подушками используется для стабилизации голеностопного сустава и ограничения боковых движений. Охлажденные в морозильной камере в течение 15-20 минут гелевые подушки ортеза позволяют уменьшить болевой синдром и отек мягких тканей сустава в первые сутки после травмы, в период воспалительного заболевания или после оперативного лечения.

Показания к применению:

- повреждения связок голеностопного сустава;
- ушибы, острые травмы лодыжек;
- реабилитация после вывихов, подвывихов голеностопного сустава;
- болевой синдром и отеки после операций и травм костей и мягких тканей голеностопного сустава.

Режим и сроки ношения:

Режим и сроки ношения ортеза назначает лечащий врач.

Противопоказания:

Не выявлены.

Предупреждения:

- в случаях гнойных заболеваний и/или заболеваний кожи в области применения ортеза необходима консультация лечащего врача;
- при возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует проконсультироваться с врачом о возможности дальнейшего использования ортеза.

ВНИМАНИЕ!

Не следует затягивать фиксирующие ремни слишком сильно, во избежание нарушения кровообращения.

Инструкция по применению:

Конструкция ортеза:

Цифры на рис. 1, рис. 2 соответствуют следующим элементам конструкции:

- Две боковые накладочки, повторяющие форму ноги, изготовленные из пластика повышенной прочности, устойчивого к механическим нагрузкам
- Две гелевые подушки к боковым накладкам, обеспечивающие плотное прилегание ортеза к голеностопному суставу. Гелевые подушки, охлажденные в холодильнике в течение 10-15 минут, сохраняют низкую температуру до двух часов.



Рис. 1

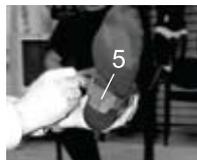


Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6

- Регулирующий ремень с застежками-липучками «Велкро».
- Два фиксирующих ремня с застежками-липучками «Велкро».
- Подошвенная часть ортеза.

Порядок надевания:

- Ортез можно одевать на правую и на левую ногу. Отрегулируйте с помощью ремня (3) положение подошвенной части ортеза (5) так, чтобы подошвенная часть расположилась посередине, а нижние края боковых накладок касались подошвы. (см. рис.1, 2).
- Прикрепите к пластиковым накладкам охлажденные гелевые подушки и разместите ортез на голеностопном суставе так, чтобы выемки в пластиковых накладках располагались в области костных выступов голеностопного сустава и плотно прилегли к лодыжкам (см. рис.3).
- Зафиксируйте ортез фиксирующими ремнями (4) сначала в нижней части голени (см. рис.4), затем в верхней части ортеза (см. рис. 5). Отрегулируйте натяжение фиксирующих ремней с застежками-липучками «Велкро», обеспечив плотное прилегание ортеза к голени.

Правила подбора:

Ортез Orlett на голеностопный сустав усиленный, пластиковый, с гелевыми подушками имеет универсальный размер, одевается как на правую, так и на левую ногу.