

Luxator® - инструменты для удаления зубов.

Заточка вашего инструмента Luxator®.

Для получения оптимальных результатов и удлинения сроков службы инструментов, они всегда должны быть хорошо заточенными. Основным назначением этих инструментов является разрезание периодонтальной связки, в основном, инструмент используют подобно периотому.

Заточка инструментов Luxator® отвечает общим принципам затачивания всех острых инструментов:

1. Инструмент должен быть чистым;
2. Острые края инструмента всегда следует проводить через поверхность точильного бруска, чтобы избежать образования «проволочного края».
3. Точильный брусок всегда должен быть смазан специальным маслом для заточки инструментов или водой во избежание забивания поверхности инструмента абразивными частицами или других загрязнений.

Метод затачивания инструмента:

Держите конец точильного бруска в левой руке, а инструмент Luxator® возьмите в правую руку. Поместите вогнутую поверхность верхушки лезвия на точильный брусок и резко отведите назад левой рукой. Поднимайте лезвие после каждого прохода и меняйте исходный участок бруска. Повторяйте процедуру до тех пор, пока лезвие не станет острым.



Точильный брусок.