

Фирма – изготовитель:
Microlife AG
Espanstrasse 139
CH-9443 Widnau/ Switzerland
Tel. +41 71 727 7030
Fax +41 71 727 7039
www.microlife.com

IB-M-L-airflater RU 2008

Поставщик:
ЗАО "Альфа-Медика"
г. Москва
ул. Авангардная, 3
тел.: (495) 645-8699
www.alpha-medica.ru

Телефон горячей линии «MICROLIFE»:
Для Москвы: 645-87-01 Для России: 8 (800) 200-33-22

Дата продажи: ___ / _____ / 20 ___ г.

Печать торговой организации



Манжета универсального M-L размера (wide range)

RU	Область применения	1
	Комплект поставки	1
	Выбор размера	2
	Правила эксплуатации	3
	Хранение и уход	4
	Гарантия	5
	Адреса сервисных центров	6



microlife

microlife®
Мой новый мир!

Манжета универсального M-L размера

RU

Уважаемый покупатель!

Швейцарская компания MICROLIFE благодарит Вас за покупку манжеты для цифровых измерителей артериального давления и частоты пульса. Мы уверены, что, оценив качество, надежность и достоинства манжеты, Вы останетесь постоянным пользователем нашей продукции.

Область применения

Манжета предназначена для использования с приборами для измерения артериального давления фирмы MICROLIFE.

Комплект поставки

1. Манжета универсального M-L размера.
2. Соединительная трубка.
3. Коннектор для соединения с автоматическим измерителем артериального давления.
4. Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном.


Манжета универсального M-L размера

RU

Выбор правильного размера манжеты


Использование манжеты, не соответствующей размеру руки пользователя, искажает результат измерения артериального давления.

Если манжета мала, результат измерения будет завышен. Если велика – занижен. Манжета универсального размера подходит людям с окружностью руки 22-42 см., а значит большинству пользователям тонометрами MICROLIFE. Если индикатор в виде Δ указывает на зону «OK», то это значит- манжета подходит по размеру и ей можно пользоваться.

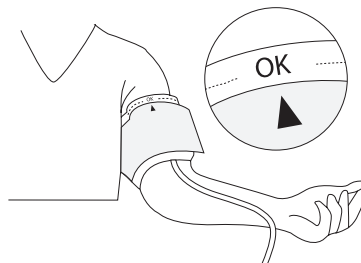

Правила эксплуатации

1. Вставьте коннектор соединительной трубки в разъем, расположенный на боковой панели прибора.
2. Наложите манжету на руку на расстоянии 2 см выше локтевого сгиба. Не закатывайте рукава одежды, так как это может помешать току крови в сосудах, и не выполняйте измерения в одежде из плотной ткани.
3. Плотнo, с учетом конусности руки, закрепите манжету. Накачка плохо закрепленной или незакрепленной манжеты может привести к некорректным результатам и ее разрыву.
4. Убедитесь в том, что трубка нагнетания воздуха в манжету находится над локтевой ямкой.
5. Выполните измерение артериального давления как описано в руководстве по эксплуатации Вашего прибора.

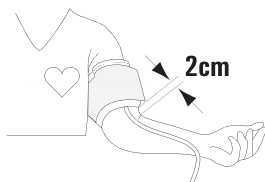

3

microlife

Манжета универсального M-L размера

RU

Гарантийные обязательства

Гарантийные сроки службы установлены в соответствии со статьями № 470 и № 471 ГК РФ и статьей № 19 п. 3 Закона «О защите прав потребителей» (с изменениями от 27 октября 2007 года).

Гарантийный срок эксплуатации манжеты – 1 год.

В случае обнаружения производственного дефекта покупателю гарантируется бесплатный ремонт или замена манжеты в течение всего гарантийного срока. Гарантийные обязательства действительны только при соблюдении правил эксплуатации.

Высокое качество данной продукции подтверждено Регистрационным удостоверением Министерства Здравоохранения РФ ФС №2006/89

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы равен 3 годам при условии, что данный продукт используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по применению.

Срок службы – срок, в течение которого товар пригоден для эффективного использования по назначению.

5

microlife

Хранение и уход

Избегайте сильного сворачивания манжеты и скручивания соединительных трубок. Оберегайте манжету и соединительную трубку от острых предметов.

Тип манжеты	Описание
Универсальная M-L (wide range)	Универсальная манжета для окружности руки 22-42 см
Условия эксплуатации Температура Влажность	От +10°C до +40 °C От 15% до90%
Условия хранения Температура Влажность	От -10°C до +60 °C От 15% до 90%

4

microlife

Сервисные центры Microlife

RU

Москва ООО "Альфа-Сервис", ул. Петра Романова, 6, тел.: (495) 679-96-96	Казань ООО "Альфа-Медика Казань" ул. Чистопольская, 75, оф. 17, тел.: (843) 527-79-22	тел.: (383) 22-72-122
Санкт-Петербург ООО "Микролайф-Север", Южное шоссе, д. 37 корп. 1, литера В, пом. 15, тел.: (812) 493-24-02	Калининград ООО "Медиком Плюс", ул. Севастьянова, д. 3/5, оф. 27 тел.: (4012) 53-32-73	Оренбург ООО "Эко-Мост", Ул. Джангильдина, д. 11, тел.: 8 905 819-86-17
Барнаул ООО "Форт Медтехника ЛТД" ул. Чапаева, 53а, тел.: (3852) 24-33-18	Калининград ИП "Плюс", ул. Горького, д. 55, оф. 232, тел.: (4012) 76-88-42	Омск ОАО ПП "Медтеоника", ул. Ариольда Нейбура, 100, тел.: (3812) 36-94-21
Белгород ИП "Сычев", Ул. Свободная, д. 34, оф. 5, тел.: (4722) 36-12-97	Кострома ООО "Костромская Медтехника-сервис", ул. Шагова, д. 48 а тел.: (4942) 55-68-01	Пenza ООО "Медсервис", ул. Свердлова, д. 2, оф. 504, тел.: (8412) 32-11-11
Брянск ООО "Брянский медико-технический центр", Ул. Харьковская, д. 14, тел.: (4832) 51-81-46	Курск ООО "Медтехника", Ахтырский пер., д. 7, б, тел.: (4712) 58-87-41	Пермь ООО "Альфа-Медика Пермь" Бульвар Гагарина, д. 706 тел.: (342) 262-05-71
Волгоград ООО "Альфа-Медика Волгоград" Шоссе Авиаторов, 8А, тел.: (8442) 53-22-30	Курск ООО "Медтехника", ул. Источная, 6 тел.: (3822) 51-37-19	Рязань ООО "Дена-МС", Старообрядческий проезд, д. 1, тел.: (4912) 25-05-57
Волода ООО "Центр медицинского обслуживания", Ул. Предтеченская 31, оф. 406, тел.: (8172) 72-73-88	Киров ООО "Вятмедсервис", ул. Московская, 23, тел.: (8332) 357-955	Самара ООО "Альфа-Медика Самара" ул. Партизанская, 19, 402, тел.: (846) 279-05-96
Воронеж ООО "Искра-Медикал" ул. Ленинградская, д. 57, к. 3 тел.: (4732) 49-53-15	Курган ООО Медкомплект, ул. Куйбышева, 12, оф. 315, тел.: (3522) 41-73-11	Томск ОАО "Медтехника", ул. Источная, 6 тел.: (3822) 51-37-19
Владимир ЗАО "Магазин Медтехника" Судогодское шоссе, д. 65 тел.: (4922) 32-99-29	Красноярск ООО "Микролайф-Регион" ул. Красной гвардии, 21, офис 511 тел.: (9912) 21-02-30	Уфа ООО "Альфа-Медика Уфа", ул. Менделеева, 114/2 тел.: (347) 295-93-19
Екатеринбург ООО "РИОП", ул. Уральских рабочих, д. 2, оф. 3, тел.: (343) 336-96-96	Краснодар ООО "Восток-Запад", ул. Яна Полуяна, д. 60, тел.: (8612) 21-32-64	Челябинск ООО "Альфа-Медика Челябинск" проспект Победы, 162 Б, тел.: (351) 247-50-56
Ижевск ООО "Медрибор", ул. Ленина, 100 тел.: (3412) 75-20-33	Мурманск ООО "Лазурит", ул. С. Перовский, д. 17, оф. 407, тел.: (8152) 45-23-82	Чебоксары ОАО "Медтехника", ул. Гладкова, 17а, тел.: (8352) 20-41-48
Йошкар-Ола ГУ РМЗ "Сервисный центр Медтехника", ул. Водопроводная,	Новосибирск ООО "Росстек", ул. Ильинская, д. 45 а	Волгодонск Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Дружбы, 14 тел.: (86392) 3-62-92
	Новосибирск ООО "Альфа-Медика Сибирь" ул. Д. Ковальчук, 77,	Ростов-на-Дону Ул. Ленина, 107 тел.: (863) 243-26-83